


# ERELZI® SensoReady® esitäytetty kynä

OPETUSPAKETTI TERVEYDENHUOLLON  
AMMATTILAISTEN KÄYTTÖÖN

## ERELZI® SensoReady® esitäytetty kynä (50 mg)

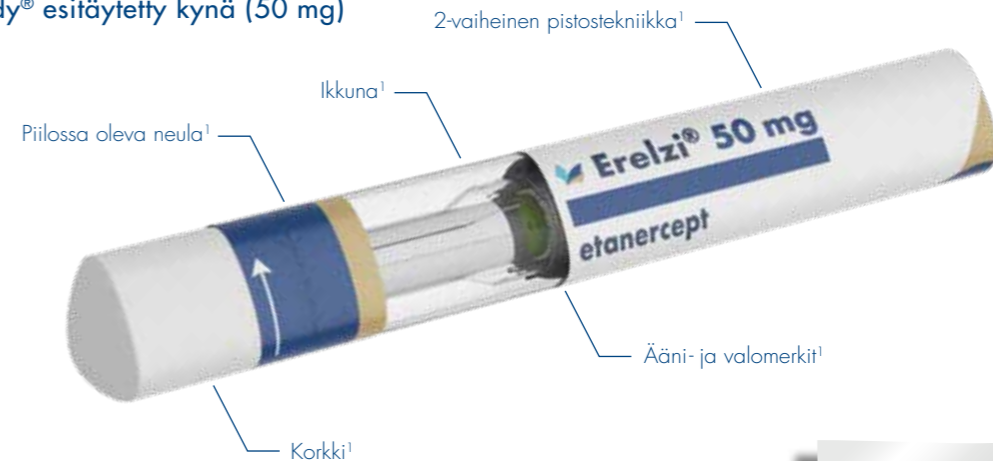

Finnean hyväksymispäivämäärä Tammikuu/2018

NR1712752604 | 2017-12

**Haittavaikutuksista ilmoittaminen:** Terveystieteiden ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan kaikista epäilyistä haittavaikutuksista seuraavalle taholle: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 Fimea. [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi) **Tutustu valmisteyhteenvetoon ennen lääkkeen määräämistä.**

### Viitteet:

1. Erelzi®-valmisteen pakkausseloste: tietoa käyttäjälle, 2016. 2. Erelzi® valmisteyhteenveto.

Sandoz A/S, c/o Sandoz  
Metsänneidonkuja 10, 02130 Espoo  
Sandoz lääkeuuvonta arkisin  
klo 9.00-15.00, puh. 010 61 33 415

**SANDOZ** A Novartis  
Division

TERVEYDENHUOLLON  
AMMATTILAISILLE

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta.

**Erelzi**  
etanersepti

Tässä paketissa on ERELZI® SensoReady® esitötetyn kynän opetuskappale. Paketti on tarkoitettu tukemaan potilaiden pistosopetuksen toteuttamista. Voit palauttaa kynän alkusentoon kunkin käytön jälkeen. Tällöin samaa kynää voi käyttää useiden potilaiden opetukseen.

### Opeta aina potilas ottamaan lääkkeensä. Tämä pienentää lääkitysvirheiden riskiä.

- Kehota potilasta lukemaan pakkausseloste kokonaan.
- Kehota potilasta noudattamaan lääkärin ohjeita.
- Kehota potilasta ottamaan yhteyttä lääkäriin, sairaanhoitajaan tai apteekkihenkilökuntaan, jos hänellä on kysyttävää hoidon aikana.

ERELZI® ei sovi alle 62,5 kg painaville lapsille eikä nuorille.

ERELZI® SensoReady® esitötettyä kynää käytetään ERELZI®-valmisteeseen (etanersepti) pistämiseen ihon alle. Vahvuus on 50 mg.<sup>1</sup>

### Opetuskynässä ei ole lääkettä eikä neulaa. Opetuskynän avulla potilaat voivat harjoitella turvallisesti.

Opetuskynän kesto aika on 3 vuotta. Ota yhteys Sandozin paikalliseen lääkeseitelijään, jos opetuskyntä lakkaa toimimasta.

### Ennen ERELZI® SensoReady® esitötetyn kynän käytön opettamista:

Kerro potilaalle, että kyseessä on opetuskyntä. Pistosopetuksen aikana potilas pääsee tutustumaan kynään, jotta lääkkeen pistäminen itse onnistuu helposti ja ilman huolta.

### Kerro injektiokyntän säilytyksestä.






Kerro seuraavista turvallisuustarkastuksista, jotta potilas motivoituu noudattamaan hyviä turvallisuustoimimuksia.

Potilaan tulee aina tehdä seuraavat turvallisuustarkastukset, kun hän pistää vaikuttavaa ERELZI®-lääkettä:

- **Tarkistetaan**, että kynän viimeinen käyttöpäivä ei ole vielä ohi.<sup>1</sup>
- **Tarkistetaan**, että neste on kirkasta tai hieman opalisoivaa, väritöntä tai vaalean kellertävää. Siinä voi olla pieniä valkoisia tai lähes läpikuultavia proteiinihiukkasia.<sup>1</sup>
- **Tarkistetaan**, että sinetti on ehjä.<sup>1</sup>

Potilaan tulee palauttaa kynä apteekkiin, jos hän huomaa siinä jonkin edellä mainituista vioista.<sup>1</sup>

## SensoReady®-opetuskyntän käyttö

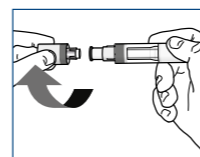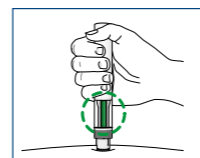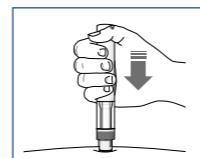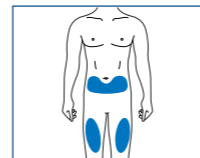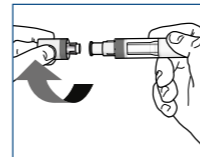

- Opetuskynässä ei ole neulaa. Sen sijaan siinä on valkoinen muoviosia, jonka avulla pistosprosessi voidaan näyttää potilaalle läpäisemättä ihoa.
- Tarkasta injektiokyntä.
- Poista korkki vasta, kun olet valmis käyttämään kynän.
- Kierrä korkki irti nuolen osoittamaan suuntaan. Hävitä irrottamasi korkki.<sup>1</sup>
- Korosta, että on tärkeää pestä kädet vedellä ja saippualla ja pyyhkiä pistoskohta puhdistuspyyhkeellä.<sup>1</sup>
- Valitse sopiva pistoskohta potilaan iholta.<sup>1</sup>
- Näytä potilaalle sopivat pistoskohdat ja kehota häntä valitsemaan kullakin kerralla uusi pistoskohta.<sup>1</sup>
- Aseta kynä kohtisuoraan (90 asteen kulmaan) ihoa vasten.<sup>1</sup>
- Paina kynää tiiviisti ihoa vasten pistoksen aloittamiseksi. Pidä edelleen kynää tiiviisti ihoa vasten painettuna.<sup>1</sup>
- Pistoksen aikana kuuluu kaksi naksahdusta. Ensimmäinen naksahdus osoittaa pistoksen alkaneen ja toinen naksahdus kertoo, että pistos on lähes valmis.<sup>1</sup>
- Kerro naksahdusten merkityksestä potilaalle.
- Tarkista, että vihreä ilmaisin täyttää ikkunan eikä enää liiku.<sup>1</sup> Kynä voidaan nyt poistaa iholta.
- Kerro potilaalle, miten ERELZI® SensoReady® esitötetty kynä hävitetään turvallisesti, ja korosta, että kynää ei saa käyttää uudelleen.<sup>1</sup>
- Opetuskynä palautetaan alkusentoon yksinkertaisesti panemalla sen suojuksen takaisin paikoilleen. Kun suojuksen irrotetaan, kynä palaa alkusentoon.